









## QUICKGUIDE TIL STREAMLINE MIC OG STREAMLINE TV

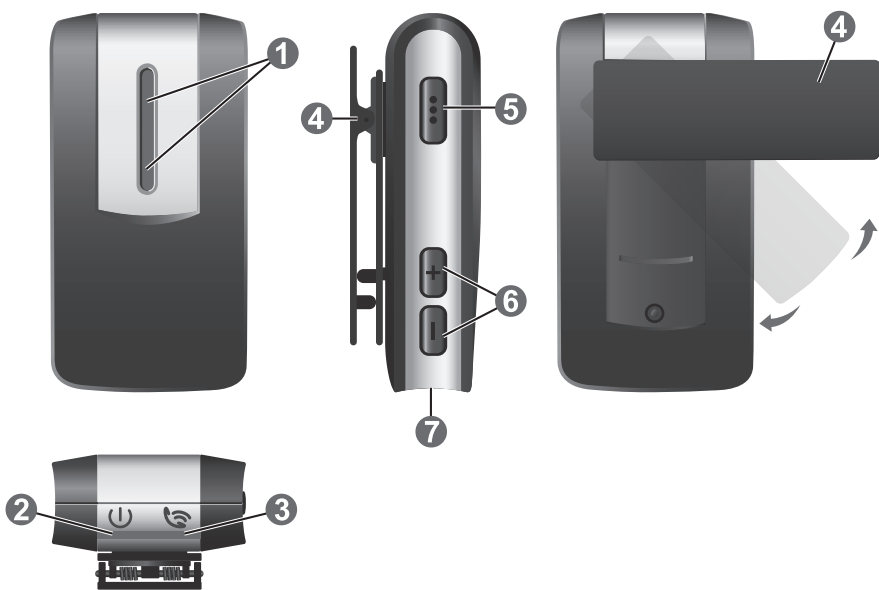





### KOMPONENTER

1. Mikrofoner
2. Strømindikator 
3. Statusindikator 
4. Klemme (roterende)
5. Multifunksjonsknapp 
6. Volumknapper  og 
7. USB-port for ladning

### PARING OPP MOT HØREAPPARAT

1. Slå høreapparat av og på.
2. Slå på Streamline Mic ved å holde multifunksjonsknappen  inne i 3 sekunder.
3. Strømindikatoren  lyser grønt .
4. Streamline Mic og høreapparat må plasseres maks 20 cm fra hverandre.
5. Statusindikatoren  blinker gult .
6. Paring opprettes automatisk.
7. Paringen er ferdig når statusindikatoren lyser gult .
8. Paring er permanent og må kun utføres en gang.




### PARING OPP MOT TELEFON

1. Slå på Bluetooth på telefonen (via innstillinger)
2. Hold inne multifunksjonsknappen  og  samtidig, helt til statusindikatoren blinker blått .
3. Dette tar ca 6 sekunder, og Streamline Mic står i paringsmodus i 3 minutter.
4. Velg "Streamline Mic" i Bluetooth-menyen på telefonen og koble til.
5. Tilkobling vil da opprettes og statusindikatoren lyser fast blått .

# STREAMLINE MIC


## KAN BRUKES SOM EKSTERN MIKROFON

### SLÅ PÅ EKSTERN MIKROFON


1. Trykk på multifunksjonsknappen  i omtrent 3 sekunder. Statusindikatoren  lyser lilla  . En bekreftelsestone spilles av i høreapparatene.
2. Den eksterne mikrofonen er slått på. Tale fra personen som bruker Streamline Mic, streames direkte til høreapparatene.

Taleren må bruke Streamline Mic som illustrert på bildene for å oppnå best mulig ytelse. Maksimal avstand: Høreapparater → Streamline Mic: 20 m.

### SLÅ AV EKSTERN MIKROFON


1. Hold multifunksjonsknappen  nede i cirka tre sekunder.

**NB!** Når Streamline Mic brukes som ekstern mikrofon, er det ingen forbindelse til smarttelefonen. F.eks. innkommende anrop vil ikke indikeres.

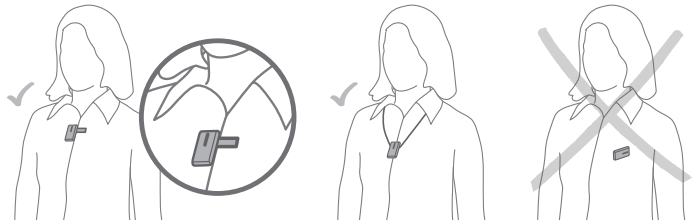

# STREAMLINE TV

### PARE HØREAPPARATENE MED STREAMLINE TV

1. Koble Streamline TV til strøm.
2. Koble Streamline TV til TV-en med TOSLINK-kabelen (a) eller RCA-kabelen (b).
3. Slå av og på høreapparatene.
4. Plasser høreapparatene oppå Streamline TV.
5. Paringen starter automatisk: LED-indikatorene lyser blått  i ca. 30 sekunder og indikerer at de pares.
6. Paring er fullført.
7. Streamingen kan aktiveres på flere måter:  
Via Signia App, trykknapp på høreapparat eller via fjernkontroll

### SIGNIA-APPEN

1. Last ned Signia-appen for å aktivere TV-streaming

